

DenFil™ Flow

гибридный композитный материал
средней текучести.



Характеристики

- превосходная эстетика, полируемость и стойкость блеска;
- низкая полимеризационная усадка;
- материал не меняет цвета после полимеризации.

Область применения

- восстановления III и V класса, малые постановления IV класса;
- основа/подложка при восстановлении I и II класса;
- ремонт временных материалов на основе смол, фарфора и акрила;
- заполнение трещин и отверстий в зубе.

Противопоказания

DenFil™ - не применяется у пациентов с гиперчувствительностью к мономерам метакрилата.

Состав

- Bis-GMA
- TEGDMA
- UDMA
- Barlum glass
- Silica

Содержание неорганического наполнителя (размер частиц 0.01~2.5µm) - 60%

Методика восстановления

1) Выбор оттенка.

Перед выбором цвета материала необходимо очистить твердую ткань зуба полировочной пастой и щеткой. Используйте шкалу Vita™ для выбора оттенка.

2) Подготовка полости.

Для изоляции рекомендуется использование раббердама.

Необходимо защитить пульпу зуба препаратом гидроксида кальция, а также прокладкой (из стеклоиономеров или другой основы).

3) Протравливание.

Необходимое количество протравочного геля (рекомендуем использовать гель протравочный DenFil™ Etchant) нанести на эмаль и дентин. Выдержать 20 секунд и замет смыть водой. Высушить в течение 2-х секунд при помощи мягкого потока воздуха, чтобы удалить излишки воды (не пересушивая).

4) Нанесение адгезива.

Нанести трехкратно на обработанную поверхность эмали и дентина адгезивную систему (рекомендуется использовать адгезив BC-Plus™, см. инструкцию). Подождать 15 секунд, замет в течение 2 секунд подсушить мягким потоком воздухом (не пересушивать). Обработать в течение 20 секунд полимеризационной лампой видимого света.

5) Нанесение материала.

Надеть одноразовую канюлю на шприц и поместите небольшое количество материала непосредственно в полость (материал может быть помещен на панель для

смешивания и нанесен с помощью аппликатора или других инструментов). Необходимо чтобы слой материала не превышал 2мм Затвердите материал полимеризационной лампой в течение 20 секунд.

6) Завершение работы.

DenFil™ Flow обрабатывается и полируется сразу после полимеризации. Для этого можно использовать гибкие диски, силиконовые полиры, полировочные щетки диски.

Хранение

- Хранить при температуре +2°C до +27°C
- Хранение при низкой температуре увеличивает срок использования материала.
- Перед применением необходимо, чтобы препарат был комнатной температуры.
- Не хранить и не применять материал с эвгенолсодержащими препаратами, так как они препятствуют отверждению.

Номер партии и сроки годности

Каждая партия материала имеет свою серию и сроки годности. Не использовать материал после истечения сроков годности.

Меры предосторожности

- Применять только в стоматологической практике.
- Не применять при гиперчувствительности пациента к акрилатам.
- Избегать попадания на кожу.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу..
- Рекомендуется использовать защитные перчатки и маску.

Условные обозначения (EN980)



Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несёт ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr

DenFil™



светоотверждаемый материал на основе гибридной композитной смолы применяемой для восстановления вестибулярной и жевательной поверхности зуба.

Характеристики

- наличие высокоплотных неорганических наполнителей придает материалу низкую полимеризационную усадку;
- материал рентгеноконтрастный;
- имеет оптимальную вязкость;
- обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям;
- хорошо поддается полировке;
- материал не меняет цвета после полимеризации.

Противопоказания

DenFil™ - не применяется у пациентов с гиперчувствительностью к мономерам метакрилата.

Состав

- Barium aluminosilicate (размер частиц: $\leq 1 \mu\text{m}$)
- Fumed silica (размер частиц: $\leq 0.04 \mu\text{m}$)
- Bisphenol A glycidyl dimethacrylate
- Triethyleneglycol dimethacrylate
- другие вспомогательные вещества

Содержание неорганического наполнителя 80%

Методика восстановления

1) Выбор оттенка.

Перед выбором цвета материала необходимо очистить твердую ткань зуба полировочной пастой и щеткой. Цвет зуба не бывает монохромным, поэтому можно выбрать несколько оттенков, чтобы добиться естественного цвета эмали зуба. Используйте шкалу Vita™.

2) Подготовка полости.

Необходимо защитить пульпу зуба препаратом гидроксида кальция, а также прокладкой (из стеклоиономера или другой основы).

3) Протравливание.

Необходимое количество протравочного геля (рекомендуем использовать гель протравочный DenFil™ Etchant) нанести на эмаль и дентин. Выдержать 20 секунд и затем смыть водой. Высушить в течение 2-х секунд при помощи мягкого потока воздуха, чтобы удалить излишки воды (не пересушивая).

4) Нанесение адгезива.

Нанести трехкратно на обработанную поверхность эмали и дентина адгезивную систему (рекомендуется использовать адгезив BC-Plus™, см. инструкцию). Подождать 15 секунд, затем в течение 2 секунд подсушить мягким потоком воздуха (не пересушивать). Обработать в течение 20 секунд полимеризационной лампой видимого света.

5) Нанесение композитного материала.

Нанести необходимое количество реставрационного материала, поворачивая по часовой стрелке винт шприца. Если восстанавливаемый материал отличается по цвету от окраски зуба, можно использовать поверхность для смешивания, чтобы подобрать нужный оттенок.

Поместите материал (толщиной слоя 2мм) в полость и тщательно адаптируйте к стенкам полости. При обработке глубоких полостей использовать метод последовательной обработки – поочередно наносить слои толщиной не более 2мм. Затвердите материал полимеризационной лампой.

Полимеризацию проводить согласно таблице:

Оттенок	Толщина слоя	Время полимеризации
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, I, P, E	2.5 мм	20 секунд
A4, D3, A2O, A3O	2.5 мм	30 секунд

6) Завершение работы.

Материал обрабатывается и полируется сразу после полимеризации. Для этого можно использовать гибкие диски, силиконовые полиры, полировочные щетки диски.

Хранение

- Хранить при температуре +2°C до +27°C.
- Хранение при низкой температуре увеличивает срок использования материала.
- Перед применением необходимо, чтобы препарат был комнатной температуры.
- Не хранить и не применять материал с эвгенолсодержащими препаратами, так как они препятствуют отверждению.

Номер партии и сроки годности

Каждая партия материала имеет свою серию и сроки годности. Не использовать после истечения сроков годности.

Предупреждение

- Применять только в стоматологической практике.
- Не применять при гиперчувствительности пациента к акрилатам.
- Избегать попадания на кожу.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться в специализированное медицинское учреждение.
- Рекомендуется использовать защитные перчатки и маску.

Условные обозначения (EN980)



Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несет ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr

Есо-S™



Гель для запечатывания фиссур

Описание

Есо-S™ светоотверждаемый герметик для фиссур и углублений, цвет белый-опаковый, обеспечивает контрастность со здоровыми тканями зуба.

Область применения

Есо-S™ предназначен для герметизации фиссур и углублений и профилактики кариеса.

Состав

Бифенол А глицидилдиметакрилат
Триэтиленгликоль диметакрилат
Кварц
Фотоинициатор
Краситель

Рекомендации по применению

1. Очищение поверхности.
Перед началом работы очистить поверхность зуба при помощи пасты, без примеси масла. Затем тщательно промыть водой.
2. Изолирование зуба.
Изолировать зуб от слюны с помощью раббердама.
3. Протравливание.
Необходимое количество протравочного геля (рекомендуем использовать DenFil™ Etchant) нанести на эмаль. Выдержать 15 секунд и затем смыть водой. Высушить в течение 2-х секунд при помощи мягкого потока воздуха, чтобы удалить излишки воды (не пересушивая). Эмаль должна приобрести белый матовый оттенок. Необходимо избегать попадание слюны на обработанную поверхность.
4. Нанесение герметика.
 - Нанести гель для запечатывания фиссур Есо-S™ на фиссуры.
 - Распределить Есо-S™ с помощью зонда по площади фиссуры с целью удаления пузырьков воздуха.
 - Затвердите Есо-S™ полимеризационной лампой в течение 20 секунд (интенсивность светового потока не менее 400 mW/cm²). Чем выше интенсивность светового потока у лампы, тем меньше время засвечивания.
 - После засвечивания Есо-S™ становится плотным и непрозрачным.
5. Окончание работ.
Ватной палочкой удалить остатки Есо-S™ с поверхности зуба.

Предупреждение

- Не применять при гиперчувствительности пациента к акрилатам.
- При контакте материала со слизистой оболочкой глаза или ротовой полости немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды.

- При применении используйте защитные перчатки.
- Не применять после окончания срока годности.

Хранение

- Хранить при температуре +2°C до +27°C. Хранить в темном месте, избегать воздействия солнечных лучей.
- Хранение при низкой температуре увеличивает срок хранения.
- Перед использованием материал должен быть комнатной температуры.
- Не хранить и не применять материал с эвгенолсодержащими препаратами, так как они препятствуют отверждению.

Условные обозначения (EN980)



Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несет ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr

DenFil™ Etchant-37



Гель протравочный на основе фосфорной кислоты (37%)

Характеристики

- DenFil™ Etchant – протравочный гель, загущенный с помощью полимерных материалов;
- оптимальная консистенция (полугель) и цвет обеспечивают удобство в работе, позволяют контролировать качество нанесения препарата на эмаль и в отличие от травящих растворов, исключают его попадание на дентин и слизистую оболочку полости рта;
- быстро действует и легко удаляется с поверхности;
- не оставляет следов на поверхности протравленного зуба в отличие от протравочных гелей на кремнезёмной основе.

Состав

- фосфорная кислота 37%;
- очищенная вода;
- краситель;
- вспомогательные вещества;

Противопоказания

Не применять на мягкие ткани, слизистую оболочку потовой полости и пульпу зуба.

Применение

Обеспечивает необходимую микро-шероховатость эмали, что способствует повышению прочности соединения пломбировочного материала с твердыми тканями зуба, уменьшает краевую проницаемость при пломбировании и снижает риск возникновения вторичного кариеса.

Методика травления

1. Изолируйте зуб и подготовьте полость согласно общепринятой методике.
2. Снимите колпачок и наденьте на шприц одноразовую канюлю.
3. Нанесите гель протравочный и выдержите 15 секунд. Тщательно промойте водой и просушите слабым потоком воздуха в течение 1-2 секунд.
4. Убедитесь, что поверхность приняла меловидный цвет. Избегайте попадания слюны на просушенную поверхность.
5. При необходимости повторите шаги 3-4.

Условия хранения

- Хранить при температуре +2°C до +27°C.
- После применения необходимо плотно закрывать крышку флакона с материалом.

Предупреждение

- Применять только в стоматологической практике.
- Избегать попадания на кожу.

- При попадании в глаза и на кожу промыть пораженный участок большим количеством воды и при необходимости обратиться в специализированное учреждение.
- При работе с материалом рекомендуется использовать защитные перчатки.
- Беречь от детей.
- При попадании препарата внутрь организма срочно обратиться в отделение токсикологии.
- Не использовать после окончания сроков годности.
- Хранить при температуре +2°C до +27°C.

Условные обозначения (EN980)



Срок годности



Серия



Перед применением ознакомиться с инструкцией



Условия хранения



Производитель

Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несёт ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr

Spacer™



Материал для временного пломбирования

Описание

Spacer™ временный пломбировочный материал светового отверждения, содержащий в своем составе наночастицы ионов серебра. Spacer™ обеспечивает герметичное закрытие полостей любого диаметра. Spacer™ удобен в применении за счет отсутствия липкой консистенции, имеет высокую эластичность и устойчивость к стиранию, обеспечивает надежное краевое прилегание, легко и полностью удаляется без использования вращающихся инструментов, что позволяет избежать повреждения краев отпрепарированной полости.

Состав

Уретан диметакрилат
Наночастицы кварца
Наночастицы серебра
Катализаторы и стабилизаторы

Область применения

1. Временные пломбы любого вида.
2. Временная изоляция при изготовлении вкладок и накладок.

Противопоказания

Spacer™ не применяется у пациентов с гиперчувствительностью к мономерам метакрилата.

Рекомендации по применению

1. Очистите твердую ткань зуба и изолируйте зуб при помощи раббердама.
2. Произведите препарирование полости и подготовьте ее.
3. Поместите нужное количество Spacer™ на инструмент и внесите в полость, излишек материала удалите.
4. Затвердите материал полимеризационной лампой в течение 10-20 секунд (интенсивность светового потока не менее 400 mW/cm²).
5. Проверьте поверхность затверждения Spacer™.
6. Удалите Spacer™ из полости при помощи стоматологического инструмента.

Хранение

1. Хранить при температуре +2°C до +27°C.
2. После применения тщательно закройте шприц с материалом.
3. Хранить в темном месте, избегать воздействия солнечных лучей.
4. Не применять после окончания срока годности.

Упаковка

1 шприц по 3гр.
Цвет: синий/желтый.

Предупреждение

1. Использовать только в стоматологической практике. Перед применением ознакомиться с инструкцией.
2. При медленной полимеризации Spacer™ необходимо проверить интенсивность светового потока у полимеризационной лампы.
3. При применении используйте защитные перчатки.
4. При контакте материала со слизистой оболочкой глаза или ротовой полости немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды.
5. При длительном нахождении в полости Spacer™ может произойти обесцвечивание материала, его выпадение и уменьшение краевого прилегания.
6. При одновременном применении Spacer™ и светоотверждаемого пломбировочного композитного материала одинакового химического состава происходит их адгезия. Для предотвращения подобного необходимо использовать прокладочный материал между ними.
7. Не хранить и не применять Spacer™ с эвгенолсодержащими препаратами, так как они препятствуют отверждению Spacer™.

Условные обозначения (EN980)




Срок годности



Серия



Перед применением ознакомиться с инструкцией

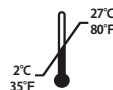

Условия хранения



Производитель

Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несёт ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr

Well-Prep™

Гель для расширения каналов



Описание

Well-Prep™ – содержит в своем составе Этилендиамин-тетра-уксусную кислоту (EDTA), которая является хелатной добавкой, позволяющей более эффективно очистить и легко подготовить канал корня. Ткань пульпы и дентиновые остатки быстро удаляются из канала корня в результате реакции пероксида мочевины, содержащегося в Well-Prep™ с раствором гипохлорида натрия. Открывая каналы корней, Well-Prep™ улучшает проникновение медикаментов и наполнителей. Также, Well-Prep™, благодаря наличию смазочного материала, улучшает эффективность в нагнетании на каналы корня.

Состав

- Этилендиамин-тетра-уксусная кислота (EDTA)
- Пероксид мочевины 10%

Преимущества

1. Легкое очищение и придание конусности корневого канала.
2. Легкое и быстрое удаление опилок дентина.
3. Устраняет декальцифицированный дентин и дает антибактериальный эффект.
4. Благодаря наличию смазочного материала обеспечивает легкое скольжение инструментов в канале.

Рекомендации по применению

1. Изолируйте зуб при помощи раббердама и вскройте его полость.
2. Введите необходимое количество Well-Prep™ прямо в пульпарную камеру.
3. Обработайте канал традиционным способом.
4. При необходимости выполните процедуру еще раз.
5. Промойте канал корня раствором гипохлорида натрия.

Предупреждение

- Применять только в стоматологической практике.
- Необходимо избегать выведения материала за пределы вершины зуба.
- Хранить в прохладном месте.
- После применения тщательно закройте шприц с материалом.
- При применении используйте защитные перчатки.
- При контакте материала со слизистыми оболочками глаз и ротовой полости немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды.
- Не применять после истечения срока годности.

Условные обозначения (EN980)




Срок годности



Серия



Инструкция по применению

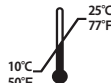

Условия хранения



Производитель

Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несёт ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr

Well-Paste™



Паста гидроокись кальция с сульфатом бария для заполнения каналов

Описание

Well-Paste™ – пломбировочный материал для пульпы и заражённых корневых каналов, также он применяется как качественный внутриканальный медикамент. Материал по большей части состоит из гидроксида кальция и сульфата бария, имея хорошую рентгеноконтрастность и антибактериальные свойства. Well-Paste™ – обладает стабильной консистенцией без разделения или отслоения, высокой текучестью и находится в удобном шприце. Так же Well-Paste™ легко достигает апекса и обладает биосовместимостью с перипикальными тканями.

Состав

- Гидроксид кальция
- Сульфат бария
- Загуститель
- Производные гликоля
- Вода

Показания

- Апексификация
- Лечение инфицированного корневого канала
- Временное пломбирование корневого канала
- Пломбирование каналов молочных зубов

Противопоказания

Не применять Well-Paste™, у пациентов с воспалениями или аллергическими реакциями на компоненты материала.

Рекомендации по применению

- После препарирования корневого канала, осторожно его промыть и просушить.
- Закрепите наконечник и снимите колпачок.
- Вставьте кончик шприца в корневой канал.
- Введите пасту, аккуратно и плавно надавливая на поршень. Шприц оснащён чётким индикатором.
- Аккуратно извлеките шприц после того, как паста полностью заполнит канал.
- Удалите излишки пасты с поверхности.
- Снимите одноразовый наконечник со шприца, плотно закройте крышку и храните материал в прохладном месте.

Хранение

- Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
- Хранить в прохладном месте. (10°C -25°C)

Предупреждение

- Применять только в стоматологической практике.
- Для использования стоматологом и зубным врачом. Соблюдайте меры предосторожности.
- Хранить в недоступном для детей, пожилых граждан и прочих лиц, несвязанных со стоматологической деятельностью месте.
- Не выдавливайте пасту слишком сильно, иначе пациент может почувствовать острую боль.
- Не выходить за пределы апекса.
- При попадании материала в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды.
- После использования Well-Paste™ плотно закройте крышечку.
- Не использовать одноразовый наконечник дважды.
- Не применять внутрь.
- Не использовать после истечения срока годности.

Условные обозначения (EN980)




Срок годности



Серия



Инструкция по применению

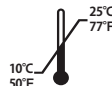

Условия хранения



Производитель

Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несёт ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr

Well-Pex™



**Паста гидроокись кальция с йодоформом
для заполнения каналов**

Описание

Well-Pex™ – пломбировочный материал для пульпы и зараженных корневого канала зуба, который так же является хорошим внутриканальным медикаментом. Well-Pex™ содержит в своем составе гидроксид кальция и йодоформ, имеет хорошую рентгеноконтрастность и антибактериальные свойства. Well-Pex™ – обладает стабильной консистенцией без разделения или отслоения, высокой текучестью и находится в удобном шприце. Так же Well-Pex™ легко достигает апекса и обладает биосовместимостью с перипикальными тканями.

Состав

- Гидроксид кальция
- Йодоформ
- Нефтяные производные

Показания

- Апексификация
- Лечение инфицированного корневого канала
- Временное пломбирование корневого канала
- Пломбирование каналов молочных зубов

Противопоказания

Не применять Well-Pex™ у пациентов с воспалениями или аллергическими реакциями на йодоформ.

Рекомендации по применению

- После препарирования корневого канала, осторожно его промыть и просушить.
- Закрепите наконечник и снимите колпачок.
- Вставьте кончик шприца в корневой канал.
- Введите пасту, аккуратно и плавно надавливая на поршень. Шприц оснащён чётким индикатором.
- Аккуратно извлеките шприц после того, как паста полностью заполнит канал.
- Удалите излишки пасты с поверхности.
- Снимите одноразовый наконечник со шприца, плотно закройте крышку и храните материал в холодном месте.

Хранение

- Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
- Хранить в прохладном месте. (10°C -25°C)

Меры предосторожности

- Применять только в стоматологической практике.
- Для использования стоматологом и зубным врачом. Соблюдайте меры предосторожности.

- Хранить в недоступном для детей, пожилых граждан и прочих лиц, несвязанных со стоматологической деятельностью месте.
- Не выдавливайте пасту слишком сильно, иначе пациент может почувствовать острую боль.
- Не выходить за пределы апекса.
- При попадании материала в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды.
- После использования Well-Pex™ плотно закройте крышечку.
- Не использовать одноразовый наконечник дважды.
- Не применять внутрь.
- Не использовать после истечения срока годности.

Условные обозначения (EN980)




Срок годности



Серия



Инструкция по
применению

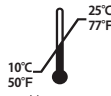

Условия
хранения



Производитель

Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несёт ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,
Gangwon-Do, 200-944, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
www.vericom.co.kr



Адгезив ВС-Plus

Адгезивная система 5-го поколения

Описание

Адгезив ВС-Plus- это светотверждаемый двухкомпонентный адгезив для универсального применения в стоматологии. Адгезив ВС-Plus специально разработан для адгезивного сцепления пломбировочных материалов с твердыми тканями зуба, а также для фиксации амальгамы и металлических и керамических протезов. Адгезив ВС-Plus - это спиртовой раствор светоактивируемых смол. Перед применением адгезива ВС-Plus необходимо обработать твердые ткани зуба гелем протравочным DenFil Etchant.

Область применения

- Создание сильного сцепления между структурой зуба и композитом, эмалевым и дентинным герметиком, изолирующей прокладкой.
- Изоляция открытого цервикального канала.
- Адгезивная фиксация протезов из керамики, стеклополимеров и композитов (вкладок, накладок, виниров и коронок).
- Адгезивная фиксация новых пломб из амальгамы.

Противопоказания

Адгезив ВС-Plus не применяется у пациентов с гиперчувствительностью к мономерам метакрилата.

Состав

- Bis-GMA
- Methacryloyl acid
- Dimethacrylate
- Ethanol
- Вспомогательные вещества

Клиническая процедура

1. Подготовить полость зуба согласно общим правилам.
2. Очистить и просушить полость. При глубоком кариесе необходимо покрыть дно прокладкой на основе гидроксида кальция или стеклоиономерным цементом, чтобы избежать раздражения пульпы.
3. Нанести гель протравочный DenFil Etchant на всю поверхность полости, начиная с эмалевого края, включая дентин на 15 секунд (тотальное травление). Для частичного травления травитель может применяться с нанесением на эмалевые края. В случае необходимости процедуру можно повторить.
4. Смыть гель протравочный DenFil Etchant водой в течение 15 секунд, удостоверившись, что DenFil Etchant не остался в полости.
5. Просушить полость воздухом без примесей масла. Дентин при этом не пересушивать.
6. Аппликатором нанести небольшое количество адгезива ВС-Plus на всю полость. Затем нанести еще дополнительно 2 слоя и подождать в течение 15 секунд.

7. Умеренным потоком воздуха просушить в течение 3 секунд.
8. Светополимеризировать в течение 20 секунд.
9. Нанести пломбировочный материал в полость зуба.

Условия хранения

- Хранить в прохладном защищенном от света месте при температуре от +2°C до +27°C.
- Хранение в холодильнике может увеличить срок годности. Перед применением необходимо чтобы препарат был комнатной температуры.
- Не хранить материал с эвгенолсодержащими препаратами, так как они препятствуют отверждению.
- После применения необходимо плотно закрывать крышку флакона с материалом.

Предостережения

- Применять только в стоматологической практике.
- Избегать контакта материала с кожными и слизистыми покровами глаз и лица. При попадании материала на кожу промыть пораженный участок водой и немедленно обратиться за помощью в специализированную медицинскую клинику.
- Не вдыхать пары материала это может привести к аллергическим реакциям. При работе с материалом рекомендуется использовать защитные перчатки и маску.
- Перед началом работы внимательно прочитать данную инструкцию.
- Не использовать после истечения срока годности и не подвергать препарат воздействию прямых солнечных лучей.
- Хранить препарат с плотно прилегающей крышкой и беречь от детей.

Условные обозначения (EN980)



Гарантия

Компания производитель VERICOM несет ответственность за качество изготовленного материала. При несоблюдении сроков и условий хранения VERICOM не несет ответственности за качество материала.



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
Tel: +82-31-441-2881 Fax: +82-31-441-2883
E-mail: vericom@vericom.co.kr
overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

Date of issue 2017.01.02. IFU06R(Rev.0)-ST