

SUPERIOR IMPRESSION



Вонфлекс
Vonflex S серия

Вонфлекс С Байт

Vonflex S Bite

Описание

Вонфлекс С Байт - используется в качестве А-силиконового регистратора прикуса для воспроизведения уникального смыкания зубов верхней и нижней челюсти.

Основное назначение

Фиксация прикуса пациента путём нанесения массы на окклюзионную поверхность и режущие края зубов нижней челюсти с последующим смыканием челюстей в привычной или центральной окклюзии.

Содержимое упаковки

- База / Катализатор в картриджах (50 мл / 2 шт)
- Смешивающие наконечники (6 шт)



Технические характеристики

DIN 13903 (Голубой цвет)		
Торговое название	Вонфлекс С Байт - нормальный режим отверждения	Вонфлекс С Байт - быстрый режим отверждения
Рабочее время	45 сек.	30 сек.
Время схватывания в полости рта	1 мин. 30 сек.	30 сек.
Точность размеров	0.11%	0.02%
Устойчивость к деформации после затвердевания	0.029 мм	0.038 мм
Прочность на изгиб	Без разрывов	Без разрывов
Степень твердости по Шору	88 ±2	88 ±2

Вонфлекс С Медиум

Vonflex S Medium

Описание

Вонфлекс С Медиум - корректирующий материал А-силиконового типа, являющийся гидрофильным винилполисилоксановым слепочным материалом, который точно отражает рельеф ткани полости рта.

Основное назначение

Формирование окончательного оттиска с воспроизведением структуры зубов и дёсен пациента.

Содержимое упаковки

- База / Катализатор в картриджах (50 мл / 2 шт)
- Смешивающие наконечники (6 шт)



Технические характеристики

ISO 4823 Тип 2 (Фиолетовый цвет)		
Торговое название	Вонфлекс С Медиум - нормальный режим отверждения	Вонфлекс С Медиум - быстрый режим отверждения
Толщина слоя для стабильного воспроизведения рельефа поверхности	31~41 мм	31~41 мм
Рабочее время	2 мин. 15 сек.	1 мин. 30 сек.
Время схватывания в полости рта	≤ 4 мин	≤ 2 мин. 30 сек.
Точность воспроизведения деталей	20µm	20µm
Линейное изменение размеров	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Совместимость с гипсом	50µm	50µm
Эластичность	≥ 99%	≥ 99%
Деформация на сжатие	≤ 5%	≤ 5%

Вонфлекс С Патти

Vonflex S Putty

Описание

Вонфлекс С Патти - основной материал А-силиконового типа, являющийся гидрофильным винилполисилоксановым слепочным материалом, который точно отражает рельеф ткани полости рта.

Основное назначение

Формирование предварительного слепка с воспроизведением структуры зубов и дёсен пациента.

Содержимое упаковки


- База / Катализатор в банках (280 мл / каждая банка)
- Ложки (2 шт)




Технические характеристики

ISO 4823 Тип 0		
Торговое название	Вонфлекс С Патти -нормальный режим отверждения	Вонфлекс С Патти -быстрый режим отверждения
Толщина слоя для стабильного воспроизведения рельефа поверхности	≤ 35 мм	≤ 35 мм
Рабочее время	2 мин.	1 мин. 30 сек
Время схватывания в полости рта	≤ 4 мин	≤ 2 мин. 30 сек.
Точность воспроизведения деталей	75µm	75µm
Линейное изменение размеров	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Совместимость с гипсом	75µm	75µm
Эластичность	≥ 99%	≥ 99%
Деформация на сжатие	≤ 3%	≤ 3%

• Эластичное восстановление

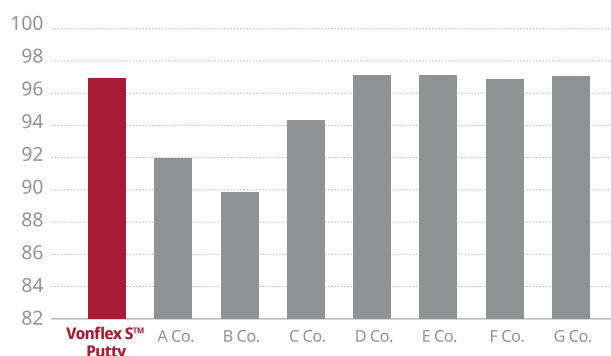

• Деформация на сжатие

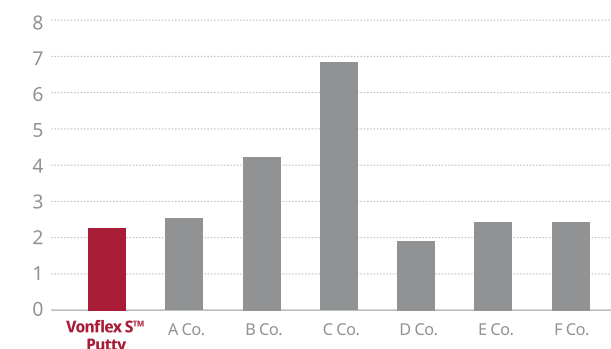

- Легко извлекается из полости рта. Имеет меньшее напряжение при сжатии и обладает превосходным упругим восстановлением формы



Вонфлекс С Лайт и Лайт XLV

Vonflex S Light & Light XLV

Описание

Вонфлекс С Лайт и Лайт XLV - корректирующий материал А-силиконового типа, являющийся гидрофильным винилполисилоксановым слепочным материалом, который точно отражает рельеф ткани полости рта.

Основное назначение

Формирование окончательного оттиска с воспроизведением структуры зубов и дёсен пациента.

Содержимое упаковки

- База/ Катализатор в картриджах (50 мл / 2 шт)
- Смешивающие наконечники (6 шт)

Увеличенная упаковка

- База/ Катализатор в картриджах (50 мл / 12 шт)



Технические характеристики


ISO 4823 Тип 3		
Торговое название	Вонфлекс С Лайт/Лайт XLV - нормальный режим отверждения	Вонфлекс С Лайт/Лайт XLV - быстрый режим отверждения
Толщина слоя для стабильного воспроизведения рельефа поверхности	≥ 36 мм	≥ 36 мм
Рабочее время	2 мин. 15 сек.	1 мин. 30 сек.
Время схватывания в полости рта	≤ 4 мин.	≤ 2 мин. 30 сек.
Точность воспроизведения деталей	20µm	20µm
Линейное изменение размеров	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Совместимость с гипсом	50µm	50µm
Эластичность	≥ 99%	≥ 99%
Деформация на сжатие	≤ 9%	≤ 9%

• Отличное детальное воспроизведение с оптимальной текучестью

- Подводный тест с Вонфлекс С Лайт



- Процедура подводного испытания

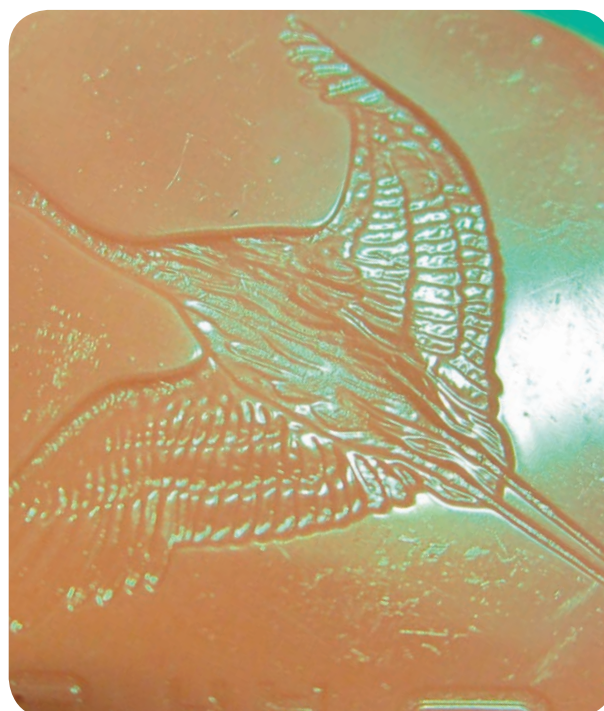

Вонфлекс С Хеви

Vonflex S Heavy

Описание

Вонфлекс С Хеви - материал А-силиконового типа, являющийся гидрофильным винилполисилоксановым слепочным материалом, который точно отражает рельеф ткани полости рта.

Основное назначение

Формирование окончательного слепка с воспроизведением структуры зубов и дёсен пациента.

Содержимое упаковки

- База / Катализатор в картриджах (50 мл / 2 шт)
- Смешивающие наконечники (6 шт)

Увеличенная упаковка


- База / Катализатор в картриджах (50 мл / 12 шт)



Технические характеристики

ISO 4823 Тип 1 (Жёлтый цвет)		
Торговое название	Вонфлекс С Хеви - Нормальный режим отверждения	Вонфлекс С Хеви - Быстрый режим отверждения
Толщина слоя для стабильного воспроизведения рельефа поверхности	≤ 35 мм	≤ 35 мм
Рабочее время	2 мин. 15 сек.	1 мин. 30 сек.
Время схватывания в полости рта	≤ 4 мин.	≤ 2 мин. 30 сек.
Точность воспроизведения деталей	50µm	50µm
Линейное изменение размеров	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Совместимость с гипсом	50µm	50µm
Эластичность	≥ 99%	≥ 99%
Деформация на сжатие	≤ 3,0%	≤ 3,0%

• Сравнение объемов впрыска при одном и том же давлении

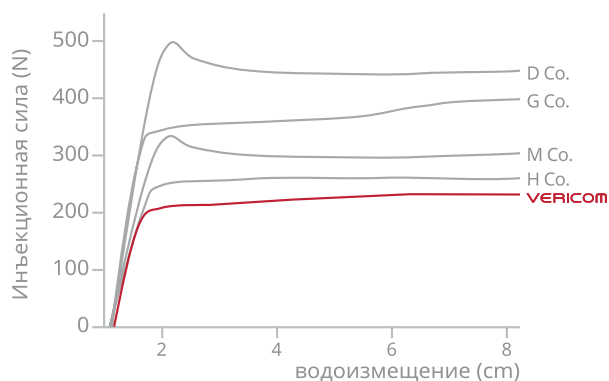

**Инъекционная сила
Более чем в два раза**



Ваш региональный представитель: